



TIM TAM

**СОВРЕМЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ**


**Power Massager™
PRO**

Руководство
пользователя



ХАРАКТЕРИСТИКИ

PowerMassager PRO – ультрасовременное массажное устройство, обеспечивающее новый уровень эффективности восстановления. Модель PRO оснащена 3 предустановленными скоростями массажа глубоких тканей и в общей сложности 5 режимами массажа для обеспечения оптимального восстановления. Массажер выполнен из антибактериального пластика для предотвращения перекрестного заражения между пользователями; шарнирная головка, регулируемая на 175 градусов, позволяет пользователям самостоятельно выполнять массаж самых труднодоступных участков тела. Массажер оснащен светодиодным дисплеем, на котором отображается уровень заряда батареи, а также показания датчика температуры, который используется для функционирования встроенной технологии теплового массажа, обеспечивающей высокоэффективное восстановление. В дополнение ко всем своим функциям массажер работает практически бесшумно.

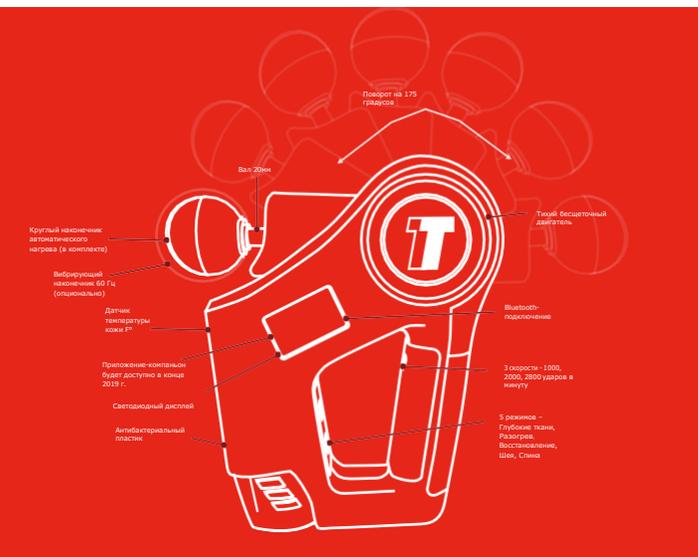

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОГО МАССАЖА

Для включения функции теплового массажа прикрепите красный наконечник и включите устройство. Нажмите кнопку **+** и удерживайте 2 секунды, пока на светодиодном дисплее не появится значок в виде шара. В течение 2 минут разогревающий наконечник (Warmup Tip) нагреется до температуры 37°C.



ВКЛЮЧЕНИЕ ВИБРАЦИИ

Для включения функции вибрации прикрепите большой серебристый наконечник и включите устройство. Нажмите кнопку **+** и удерживайте 2 секунды, пока на светодиодном дисплее не появится значок в виде шара. Наконечник сразу же начнет вибрировать.



РЕЖИМЫ МАССАЖА:

Для включения режима разогрева, восстановления, массажа шеи и спины прикрепите соответствующий наконечник и включите устройство. Нажмите кнопку **+** и переключайтесь между режимами массажа, пока не найдете нужный вам режим.



СКОРОСТИ МАССАЖА ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ

Массажер PowerMassager™ Pro оснащен 3 предустановленными скоростями массажа глубоких тканей, которые обеспечивают до 2800 ударов в минуту. Нажмите кнопку **+** для переключения между 3 скоростями (1000, 2000, 2800 ударов в минуту).



ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Чтобы включить массажер, вставьте в него батарею и один раз нажмите кнопку включения, которая находится на рукоятке устройства. Светодиодный дисплей загорится, указывая на то, что устройство включено.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения устройства нажмите кнопку **+** и удерживайте 3 секунды или просто удалите батарею.

ШАРНИРНЫЙ ВАЛ

Регулируемый шарнирный вал массажера PowerMassager™ Pro можно поворачивать на 175 градусов, что позволяет пользователю самостоятельно выполнять массаж на всех участках тела. Нажав красный логотип на круглом конусе прямо над шарнирным валом, вы можете перемещать вал в нужную позицию. Как только найдете необходимую точку массажа, отпустите кнопку, чтобы зафиксировать вал в данной позиции.



Датчик температуры

Массажер PowerMassager™ Pro оснащен встроенным температурным датчиком, позволяющим получить необходимые персональные данные до, во время и после массажа! Найдите значок температурного датчика (с изображением термометра) на внешней стороне рукоятки. Включите массажер, прижмите фронтальную часть устройства к коже, затем нажмите кнопку датчика температуры, удерживайте 3 секунды и отпустите. Датчик измерит температуру кожи на данном участке тела – результаты измерения появятся на светодиодном дисплее. Оптимальная температура кожи - выше 90° F (32°C) градусов: когда разогревающий наконечник, который вы используете, более не является теплым для вашей кожи, это означает, что ваши мышцы достигли оптимальной температуры для безопасной тренировки и восстановления!

РЕГУЛИРОВКА И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

Не включайте массажер PowerMassager Pro до прикрепления к нему необходимого аксессуара. Направьте наконечник массажера к себе, найдите необходимую точку массажа и отрегулируйте положение рукоятки, выбрав максимально удобную позицию для выполнения массажа. Если вы используете наконечник с приводом, выполните необходимые действия, прежде чем начинать работу с PowerMassager Pro.



ДАВЛЕНИЕ


Применяя массажер на своем теле, вы сразу почувствуете, какое давление необходимо для достижения желаемого эффекта. При использовании **PowerMassager™ Pro** не следует прилагать дополнительную силу и надавливать на область массажа.

*** Соблюдайте осторожность при использовании массажера другим человеком для массажа вашего тела. Ознакомьтесь с функциями и определите необходимое давление. У каждого человека свой индивидуальный болевой порог. В большинстве случаев для эффективного массажа с помощью **PowerMassager™ Pro** не требуется какого-либо дополнительного давления.



РАСПОЛОЖЕНИЕ РУКИ

PowerMassager™ Pro запускается одним нажатием, оснащен шарнирным валом, регулируемым на 175 градусов. Массажер предназначен для самостоятельного использования. Ниже показаны 3 зоны массажера, за которые пользователь может держаться при выполнении массажа. Используя эти возможности в сочетании с регулировкой положения шарнирной головки, вы сможете получить доступ к большей части своего тела.

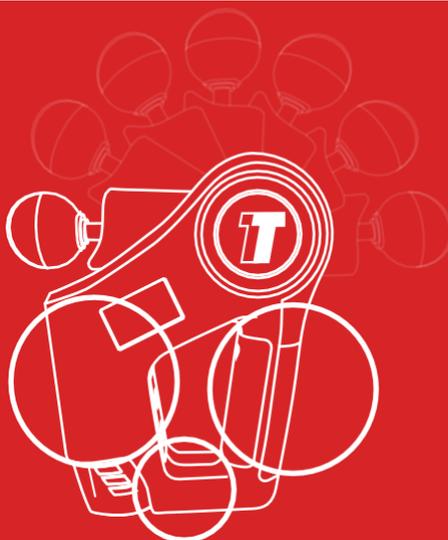

ЗАРЯДКА



- ✓ Зарядное устройство переменного тока: 100-240В 50/60 Гц- 8А -15В пост. тока - 1А
- ✓ Перезаряжаемая литий-ионная батарея 2000 мАч
- ✓ Настенное зарядное устройство переменного тока (15 В пост. тока - 1А)

* Для надлежащего функционирования массажер TimTam PowerMassager™ Pro должен использоваться только с поставляемым сертифицированным зарядным устройством TimTam с соответствующим предохранительным датчиком.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

- 1 Подсоедините контактный адаптер к зарядному порту.




- 2 Расположите адаптер в соответствии с контактами на зарядном устройстве и поверните его, чтобы зафиксировать на месте.



Чтобы отсоединить контакты от адаптера, нажмите кнопку в нижней левой части и одновременно поверните адаптер влево.

- 3 Вставьте батарею в зарядную базу, одновременно подключив кабель к задней части базы.

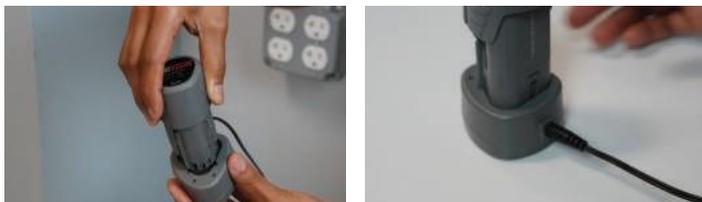


- 4 Подключите к розетке с соответствующими номинальными характеристиками.



- 5 Полностью зарядите перед использованием. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда батареи и активный статус процесса зарядки.

Красный светодиод слева = идет зарядка

Зеленый светодиод справа = зарядка завершена

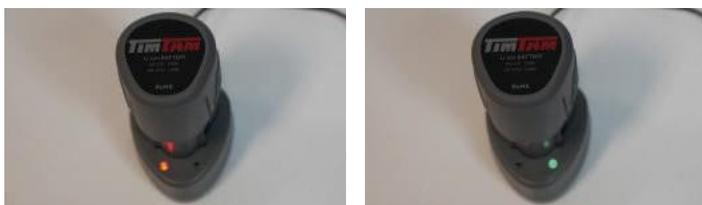

Если адаптер подключен к розетке, светодиодный индикатор будет гореть после завершения зарядки.

- 6 Устройство можно заряжать в любое время, при любом уровне заряда батареи. Не рекомендуется полностью разряжать батарею до нулевого уровня. Регулярно перезаряжайте устройство, чтобы продлить срок службы батареи.



УХОД, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Используйте салфетку или мягкую ткань, чтобы удалить влагу с устройства.

- Хранить в прохладном месте
- Храните устройство вдали от источников тепла и жидкостей. Не допускайте использования прибора неопытными людьми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1

Прежде чем использовать массажер, проконсультируйтесь с врачом или лицензированным медицинским работником, так как использование продукта может вызвать осложнения, если у вас имеются определенные заболевания, например головные боли, проблемы с суставами, имплантированные устройства, перенесенные операции, беременность, диабет. Для пожилых людей и детей настоятельно рекомендуется применять устройство под наблюдением.

2

Не пытайтесь разобрать или собрать PowerMassager™ - это может привести к удару электрическим током, пожару или воздействию химических веществ, содержащихся в батарее, а также к выходу устройства из строя.

3

Храните PowerMassager™ в сухом прохладном месте. Хранение устройства в условиях высокой температуры или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, может привести к его неисправности.

4

Храните устройство вдали от жидкостей, так как контакт с жидкостью может привести к повреждению устройства.

5

Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.

6

После интенсивного использования дайте устройству остыть 20 минут в выключенном состоянии, и только потом включите его снова.

7

Не оставляйте зарядное устройство подключенным после полной зарядки батареи, так как это может привести к сокращению срока службы или повреждению батареи.

8

Перед использованием массажера PowerMassager™ Убедитесь, что зарядное устройство отключено от массажера. Вытащите зарядное устройство из розетки, если оно не используется. Убедитесь, что кабель зарядного устройства хорошо виден, чтобы на него не наступали и не повреждали. Поврежденное зарядное устройство следует немедленно заменить.

9

TimTam PowerMassager™ следует заряжать в хорошо проветриваемом помещении. Не разрешается заряжать устройство вне помещения, на влажной поверхности, при большой влажности воздуха, при воздействии дождя, снега или тепла, так как это может привести к повреждению устройства. Не используйте батарею или зарядное устройство вблизи огнеопасных мест, так как это может привести к пожару.

10

Не бросайте устройство на твердую поверхность, так как вследствие удара оно может выйти из строя.

11

Избыточное давление на Tim Tam PowerMassager™ во время нормального использования по назначению может привести к повреждению или поломке устройства.