



TIM TAM

**СОВРЕМЕННОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ**

**All New
PowerMassager™
Руководство
пользователя**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

The TimTam All New PowerMassager™ - модернизированное индивидуальное устройство перкуссионной терапии. Массажер All New PowerMassager разработан в сотрудничестве с медиками, тренерами и профессиональными спортсменами и оснащен рядом усовершенствованных функций.

All New PowerMassager™



Личное использование



Глубокие ткани



Профессиональное использование



Высокая интенсивность



Широкие мышцы



Сменная батарея



УЛУЧШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Емкость новой батареи вдвое больше предыдущей версии.



ВКЛЮЧЕНИЕ ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Одно нажатие - и вы готовы начать восстановление. Труднодоступные участки тела теперь можно массировать самостоятельно.



БОЛЕЕ ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА

Массажер работает тише, чем его предшественник, уровень шума 25 дБ.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПЛАСТИК

Ручка массажера выполнена из антибактериального пластика, который предотвращает развитие микроорганизмов и перекрестное микробиологическое загрязнение.

РЕГУЛИРОВКА И БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА

Не включайте массажер PowerMassager до прикрепления к нему необходимого аксессуара. Направьте наконечник массажера к себе, найдите необходимую точку массажа и отрегулируйте положение рукоятки, выбрав максимально удобное положение для выполнения массажа.



ДАВЛЕНИЕ

Применяя массажер на своем теле, вы сразу почувствуете, какое давление необходимо для достижения желаемого эффекта.

*** Соблюдайте осторожность при использовании массажера другим человеком для массажа вашего тела. Ознакомьтесь с функциями и определите необходимое давление.

У каждого человека свой индивидуальный болевой порог. В большинстве случаев для эффективного массажа с помощью All New PowerMassager™ не требуется какого-либо дополнительного давления.



РАСПОЛОЖЕНИЕ РУКИ

TimTam All New PowerMassager™ запускается одним нажатием и предназначен для самостоятельного использования в 90% случаев. При выполнении массажа пользователь может захватывать рукой различные части массажера и держать устройство в разных положениях, благодаря чему увеличивается маневренность массажера, и пользователь может выполнять массаж на труднодоступных участках тела. Ниже показаны 3 зоны массажера, за которые пользователь может держаться при выполнении массажа. Используя эти возможности в сочетании с регулировкой положения шарнирной головки, вы сможете получить доступ к большей части своего тела.



ЗАРЯДКА



- ✓ Зарядное устройство переменного тока: 100-240V 50/60 Гц- 8A -15В пост. тока - 1A
- ✓ Перезаряжаемая литий-ионная батарея 2000 мАч
- ✓ Настенное зарядное устройство переменного тока (15 В пост. тока - 1A)

* Для надлежащего функционирования массажер TimTam All New PowerMassager должен использоваться только с поставляемым сертифицированным зарядным устройством TimTam с соответствующим предохранительным датчиком.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

- 1 Подсоедините контактный адаптер к зарядному порту.



- 2 Расположите адаптер в соответствии с контактами на зарядном устройстве и поверните его, чтобы зафиксировать на месте.



Чтобы отсоединить контакты от адаптера, нажмите кнопку в нижней левой части и одновременно поверните адаптер влево.

- 3 Вставьте батарею в зарядную базу, одновременно подключив кабель к задней части базы.




- 4 Подключите к розетке с соответствующими номинальными характеристиками.



- 5 Полностью зарядите перед использованием. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда батареи и активный статус процесса зарядки.

Красный светодиод слева = идет зарядка Зеленый светодиод справа = зарядка завершена

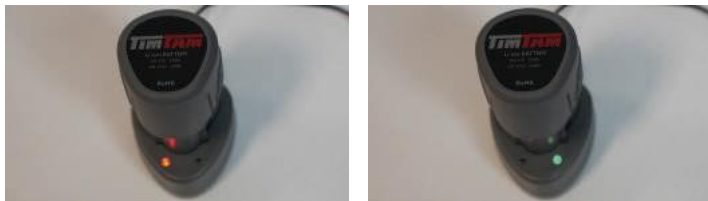

Если адаптер подключен к розетке, светодиодный индикатор будет гореть после завершения зарядки.

- 6 Устройство можно заряжать в любое время, при любом уровне заряда батареи. Не рекомендуется полностью разряжать батарею до нулевого уровня. Регулярно перезаряжайте устройство, чтобы продлить срок службы батареи.



УХОД, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Используйте салфетку или мягкую ткань, чтобы удалить влагу с устройства.
- Хранить в прохладном месте
- Храните устройство вдали от источников тепла и жидкостей. Не допускайте использования прибора неопытными людьми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



- 1 Прежде чем использовать массажер, проконсультируйтесь с врачом или лицензированным медицинским работником, так как использование продукта может вызвать осложнения, если у вас имеются определенные заболевания, например головные боли, проблемы с суставами, имплантированные устройства, перенесенные операции, беременность, диабет. Для пожилых людей и детей настоятельно рекомендуется применять устройство под наблюдением.
- 2 Не пытайтесь разобрать или собрать PowerMassager™ - это может привести к удару электрическим током, пожару или воздействию химических веществ, содержащихся в батарее, а также к выходу устройства из строя.
- 3 Храните PowerMassager™ в сухом прохладном месте. Хранение устройства в условиях высокой температуры или в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, может привести к его неисправности.
- 4 Храните устройство вдали от жидкостей, так как контакт с жидкостью может привести к повреждению устройства.
- 5 Не используйте устройство непрерывно более 30 минут.
- 6 После интенсивного использования дайте устройству остыть 20 минут в выключенном состоянии, и только потом включите его снова.
- 7 Не оставляйте зарядное устройство подключенным после полной зарядки батареи, так как это может привести к сокращению срока службы или повреждению батареи.
- 8 Перед использованием массажера PowerMassager™ убедитесь, что зарядное устройство отключено от массажера. Вытащите зарядное устройство из розетки, если оно не используется. Убедитесь, что кабель зарядного устройства хорошо виден, чтобы на него не наступали и не повреждали. Поврежденное зарядное устройство следует немедленно заменить.
- 9 TimTam PowerMassager™ следует заряжать в хорошо проветриваемом помещении. Не разрешается заряжать устройство вне помещения, на влажной поверхности, при большой влажности воздуха, при воздействии дождя, снега или тепла, так как это может привести к повреждению устройства. Не используйте батарею или зарядное устройство вблизи огнеопасных мест, так как это может привести к пожару.
- 10 Не бросайте устройство на твердую поверхность, так как вследствие удара оно может выйти из строя.
- 11 Избыточное давление на Tim Tam PowerMassager™ во время нормального использования по назначению может привести к повреждению или поломке устройства.